



EXTRACCIÓN DE SANGRE DE SEGURIDAD




Su innovador diseño facilita la toma segura de muestras de sangre capilar. La función de liberación única y un capuchón protector sellado, protegen y preservan a pacientes y sanitarios de contaminación cruzada o lesiones. Las lancetas mylife™ SafetyLancets están disponibles en dos versiones diferentes: mylife™ SafetyLancets (28G/1,5mm) y mylife™ SafetyLancets Comfort (30G/1,2mm)

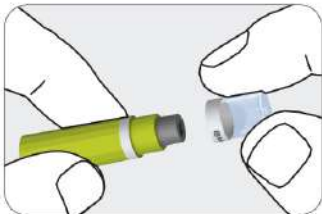


1. Simplemente gire y retire el capuchón protector de la mylife™ SafetyLancet

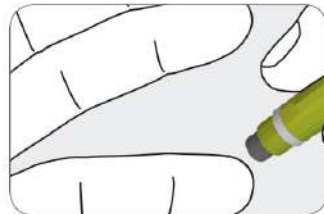

2. Coloque la mylife™ SafetyLancet sobre el dedo.

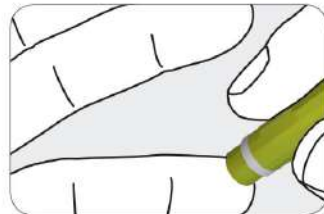

3. Presione la plataforma elevada firmemente sobre el punto elegido para activar el mecanismo de la lanceta.

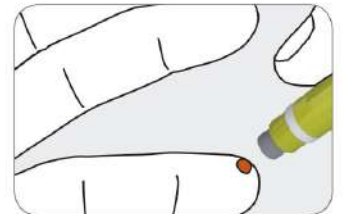

4. La aguja se retrae inmediatamente después del uso. Gracias a la función de liberación de uso único, la mylife™ SafetyLancet no se puede reutilizar accidentalmente.

CARACTERÍSTICAS

- El precinto de seguridad indica visualmente si la mylife™ SafetyLancet ya se ha utilizado o no.
- El capuchón protector mantiene la esterilización y evita la contaminación antes del uso.
- Gracias a la función de liberación única, queda inutilizada después del uso.

Lancetas para extracción de sangre de seguridad