

Ficha Técnica

Código	Nombre	Lote Venta	Cód. Barras
		Marca CE	Unid/Caja
302	QC Hemo Dressing 2"x2",Multi-Lang,CE,10x	10	841495103025

QUICKCLOT Hemostatic Dressing 5cmx5cm.El apósito hemostático QuikClot es un suave apósito estéril, blando, de color blanco, detectable bajo rayos X, envasado para la retirada aséptica. Este producto contiene caolín.Está destinado al uso como apósito tópico para el tratamiento local de heridas sangrantes como cortes,laceraciones y abrasiones. También se puede utilizar para el tratamiento temporal de heridas sangrantes graves (operatorias,postoperatorias, dermatológicas, etc.) y lesiones traumáticas.Contraindicaciones: No se han establecido la seguridad y la efectividad del apósito hemostático QuikClot para el uso en aplicaciones neurológicas, oftálmicas, espinales, gastrointestinales, ortopédicas (reparaciones óseas), todas las anastomosis (incluyendo vasculares) y sitios de punción de la arteria femoral.

2797 30841495103026



ADVERTENCIAS

- No indicado para su uso en intervenciones quirúrgicas internas.
- Este producto no es reabsorbible y debe retirarse de la herida antes de que se cierre la herida.
- El apósito hemostático QuikClot no está destinado al uso como sustituto de una técnica quirúrgica meticulosa, de procedimientos estériles ni de la aplicación de ligaduras u otros procedimientos convencionales para controlar la hemorragia.
- El apósito hemostático QuikClot no debe dejarse en la herida durante más de 24 horas.
- Evitar el contacto con los ojos.

Precauciones

- El apósito hemostático QuikClot debe aplicarse a la fuente real de hemorragia. El apósito no puede influir en la hemostasia de colocarse en la proximidad de la hemorragia.
- Si la hemorragia persiste debe aplicarse más producto a la herida.
- La reutilización causará riesgo de infección y pérdida de la eficacia.Condiciones de almacenamiento:Mantener seco.Mantener alejado del calor (incluyendo el almacenamiento bajo la luz directa del sol o en contacto directo con fuentes de calor). Almacenar a temperaturas de 25 °C o menos.

Esterilidad y caducidad:El producto se esteriliza mediante la exposición a radiación gamma y está destinado a un solo uso. No reesterilizar. No utilizar si la bolsa estéril está dañada o abierta. No utilice el dispositivo después de la fecha de caducidad indicada en el paquete. Estéril. Un solo uso. Presentación: caja 10 uds.

(Sin Látex / Sin Dehp)