

Otoscopio RIESTER 2,5V

RI-SCOPE

Otoscopios

- Óptica de vidrio.
- Dos tipos de iluminación: Directa o F.O.
- Lente quirúrgica de 4 aumentos.
- Adecuado para realizar pruebas neumáticas (se suministra sin la pera).
- Mango para pilas tipo C o mango recargable a red.
- Baterías de litio o iones para el modelo de luz LED.

Oftalmoscopios

- Óptica de alto rendimiento.
- Lente condensadora esférica.
- Apoyo par el pulgar para estabilizar el oftalmoscopio.
- Todos los elementos se pueden manejar facilmente con un sólo dedo.

Iluminación y voltaje

- Halógena 2.5v.
- Xenón 3.5v.
- LED 3.5v.
- Materiales: Cabezales de plástico resistente.
- Mangos de metal cromado.
- Alimentación: Pilas tipo C o red para mango recargables.

TA-3700. Otoscopio RIESTER 2,5V RI-SCOPE



Otoscopio 2056-201

PENSSCOPE

El otoscopio Riester Pencscope 2056-201 Negro es un dispositivo médico utilizado para examinar el oído y el canal auditivo. Este otoscopio cuenta con una luz directa halógena que proporciona una iluminación clara y brillante, permitiendo al médico visualizar con precisión cualquier anomalía en el oído.

Modo de empleo

Para utilizar el otoscopio Riester Pencscope 2056-201 Negro, primero asegúrese de que el dispositivo esté correctamente ensamblado. Luego, encienda la luz halógena y coloque suavemente el extremo del otoscopio en el canal auditivo del paciente. A medida que avanza, observe cuidadosamente cualquier signo de inflamación, infección u otras afecciones del oído. Si es necesario, puede utilizar las diferentes puntas y accesorios incluidos para obtener una mejor visualización.

Es importante recordar que el otoscopio debe ser utilizado por personal médico capacitado, ya que requiere conocimientos específicos para interpretar correctamente los hallazgos. Además, se recomienda limpiar y desinfectar el otoscopio después de cada uso, siguiendo las instrucciones del fabricante.

TA-702062. Otoscopio 2056-201 PENSSCOPE